



FICHA TECNICA PROTECTIVE MASK (KN95)

1. Referencias:

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KN95	Mascarilla protectora Color Blanco / Blanco

2. Empaque:

	Descripción	Empaque
Función:	Material utilizado: tela no tejida fundida por soplado (capa de filtro principal), fibra de poliuretano (orejeras) Estándar ejecutivo: GB 2625-2006 (Sistema Estándar de Calidad Chino) / EN149:2001+A1:2009 (Europa) Nivel de protección: KN95, mismo nivel FFP2	Empaque primario con dos unidades. Empaque secundario (caja) de 10 unidades Medias de empaque: 13 cm x 13cm x 4 cm

3. Empaque individual

La presentación en empaque trae impresa la información del uso y la verificación de ajuste para capacitar al usuario la forma correcta de uso del respirador antes de exponerse al riesgo.

Componentes y funciones del respirador:

Componente	Banda de Ajuste x 2	Filtro: KN95	Capa de tela interna y externa	Interlon:	Lámina Galvanizada
FUNCION:	Garantiza el balance en la cabeza y eficiencia en la protección de partículas suspendida. Se utilizan elásticos con un porcentaje de algodón para garantizar la comodidad.	Garantiza con el sellado que atrapa y retiene con su carga electrostática las partículas suspendidas en el aire de 0.0725 micras.	Garantiza la contextura y presentación del respirador, este material es hipoalérgico no causa irritación al contacto con la piel y provee una sensación de suavidad y comodidad.	Garantiza la contextura y cuerpo del respirador lo hace rígido y proporciona de igual forma un material adicional de protección.	Garantiza ajuste en la parte superior del respirador sobre la nariz del usuario, evita la penetración de polvos permite la horma a la nariguera, es interna para evitar riesgo de desprendimiento.



KN95型防护口罩

Protective Mask (KN95)


KN95 Protective Mask
Huludao ShunKang Industrial co. Ltd



Huludao ShunKang Industrial co. Ltd-

Instrucciones

1. Abra la mascarilla con el extremo de la tira nasal hacia arriba.
2. Coloque la mascarilla en la posición correspondiente en la cara y presione suavemente.
3. El puente de la nariz para ajustarse a la curva de la nariz.
4. Sostenga la mascarilla y cuelgue la correa de la oreja para ajustar la posición de la mascarilla.
5. Para que la mascarilla cubra la cara.

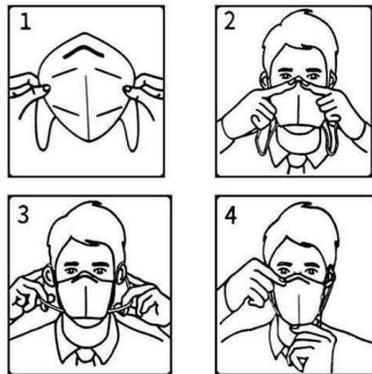

Las mascarillas KN95 podrán usarse hasta 10 veces, dependiendo del proceso de descontaminación de 2,5 horas entre cada uso.